

# 新型コロナウイルス(2019-nCoV) IgM/IgG抗体 ワンステップテスト (金コロイド法)


## 使用ガイド

### 使用方法

指先血・全血検体：20 $\mu$ L  
血清・血漿検体：10 $\mu$ L



希釈液3滴滴下

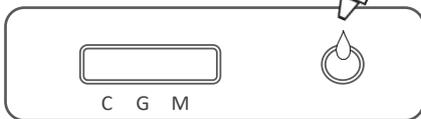


5～15分後結果判定


- ①検体は、取扱説明書に従って採血する。  
検査前にテストカード、検体、試薬は、室温(15～30℃)に戻す。
- ②使用直前に密封パウチからテストカードを取り出し  
清潔なテーブルの上に水平に置く。
- ③ピペットを用いて検体を滴下ポートに滴下する。
- ④すぐに検体希釈液3滴を滴下する
- ⑤**5～15分**待つ(最良時間は10～15分)  
※20分後の結果は使用しないでください
- ⑥判定結果の確認

### 判定方法


陽性

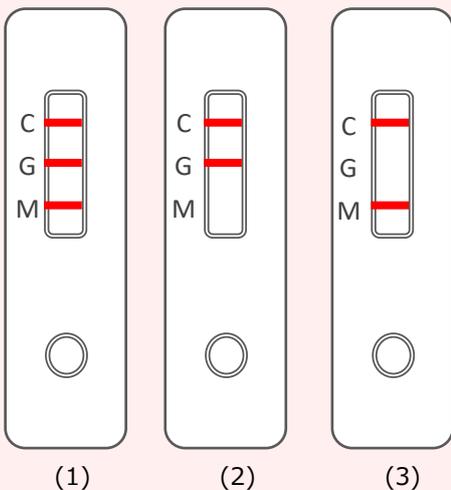

陰性

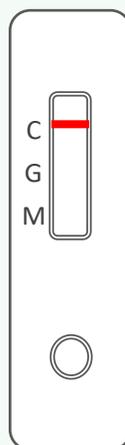

無効

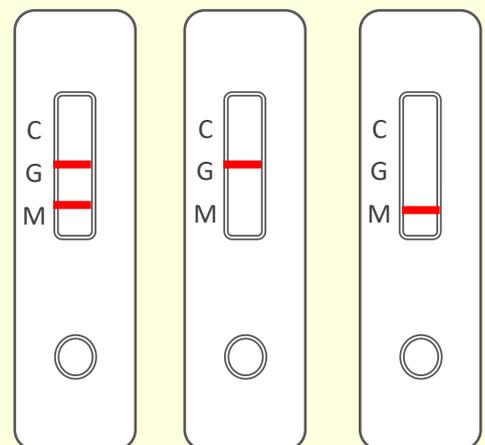

陽性：(1) C、M、G全てに赤いバンドが見られる場合、検体はIgMとIgG抗体の両方が陽性。

陽性：(2) CとGに赤いバンドが見られる場合、検体はIgG抗体が陽性。

陽性：(3) CとMに赤いバンドが見られる場合、検体はIgM抗体が陽性。

陰性：Cのみに赤いバンドが見られる場合、検体は陰性。

無効：Cに赤いバンドが現れない場合、検査結果は無効です。別のテストカードで検査をやり直してください。