


判定結果の解釈



反応カセット

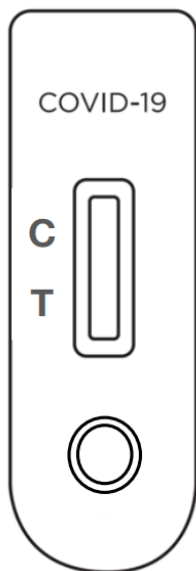


陽性

Cラインが現れる
Tラインが現れる



陰性

Cラインが現れる
Tラインが現れない

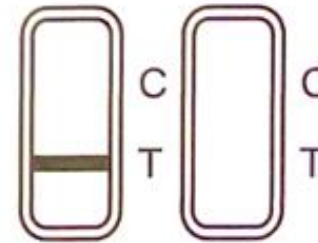

無効

Cラインが現れない
Tラインが現れる
または
Tラインが現れない

- ◆ Tラインの色強度は、検体中に存在する分析物の濃度に依存して変化する可能性があり、色の濃淡にかかわらずいずれも陽性とみなします
- ◆ Cラインが現れない原因の可能性は、検体量の不足、操作手順の誤り、または有効期限切れのテストを使用した場合が考えられます
- ◆ 解釈が困難な弱いラインの場合には、臨床情報と併せて総合的に判断してください
- ◆ 全ての診断検査と同様に、確定的な臨床診断は単一の検査の結果に基づくべきではなく、臨床所見および検査所見により、総合的に判断してください



日本バイオテクノファーマ株式会社

日本の医療の未来のために私たちができることを