

X線遮蔽をさらに強化

X線防護眼鏡+サイドプロテクターの新提案。防御効果をバージョンアップ!

X線防護眼鏡
(鉛当量:0.75mmPb)




NEW サイドプロテクター
(鉛当量:0.30mmPb)



X線防護眼鏡+サイドプロテクター装着時の 効果検証実験

10ヶ所に放射線の線量測定チップを貼り付けた頭部ファントムを用意、X線防護眼鏡+サイドプロテクター着用にて血管造影装置の近くで放射線の線量を測定。～御協力:福井大学医学部附属病院 放射線部様～

測定箇所

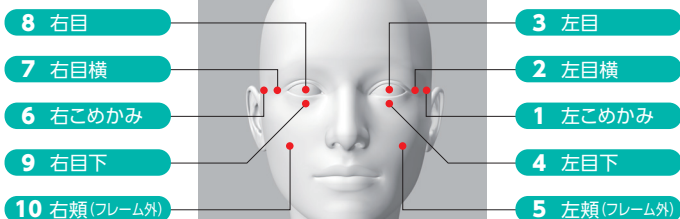



実験結果

数値は線量の透過率です。

	61-202M	61-201M
測定箇所 1 左こめかみ	25%	34%
2 左目横	19%	17%
3 左目	17%	18%
4 左目下	21%	28%
5 左頬(フレーム外)	100%	100%
6 右こめかみ	17%	15%
7 右目横	21%	21%
8 右目	29%	29%
9 右目下	31%	50%
10 右頬(フレーム外)	100%	100%

保護されていない頬部との比較において、61-202Mでは平均78%カット
※矯正有の61-201Mでは平均73%カット。測定結果にはある程度の誤差があります。

遮蔽材の避けられない重さを 独創の3点支持フレームで分散・軽減

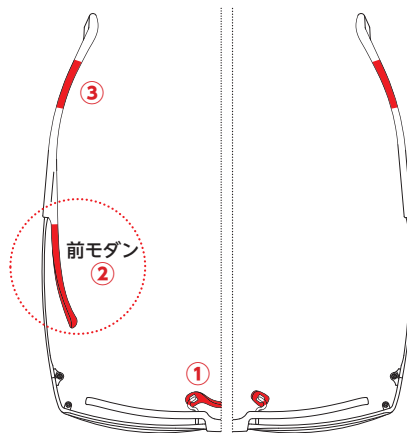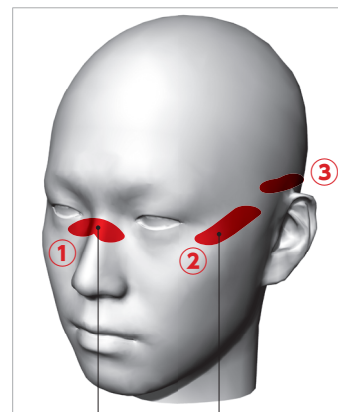

頬骨で支える前モダン②により、一点集中する鼻への重さを分散

面積が広く、柔らかいサドルパッド①を採用、重さを面で分散

CHARMANT X線防護眼鏡 ← 通常品

CHARMANT

NEW! X線防護眼鏡用サイドプロテクター

カラーは3色展開
価格(税抜):各色とも15,000円

装着例



61-203 MOR (Orange)
X線防護眼鏡:61-202 MBR



61-203 MGR (Gold)
X線防護眼鏡:61-201 MDG



61-203 MGR (Gray)
X線防護眼鏡:61-202 MLG



サイドプロテクター/61-203 MGR
X線防護眼鏡/61-201 MDG

X線防護眼鏡

● 矯正対応モデル

インナーに防護レンズ入 58□14-155 価格(税抜):110,000円

61-201 MBR (Brown)



61-201 MDG (DarkGray)



61-201 MLG (LightGray)



● 通常モデル

フレームに防護レンズ入 58□14-155 価格(税抜):77,000円

61-202 MBR (Brown)



61-202 MDG (DarkGray)



61-202 MLG (LightGray)



医療機器届出番号/ 18B2X10004000198

※X線防護レンズは CORNING®社製 Med-X®レンズ(鉛当量0.75mmPb)を採用しています。

"製品によって販売されていない地域があります。" "Not all products are available in all markets."

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※Designs and specification subject to change without notice

CHARMANT

●お問い合わせ先

株式会社 シヤルマン メディカル事業部 カスタマーサービス

〒916-8555 福井県鯖江市市川去町6-1 www.charmant-medical.com

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 For English, medical@charmant.co.jp

2019.09.50